

◆測定手順（口腔ガスのサンプリング）



- ① シリンジを袋から取り出した後、シリンジのプランジャーを2～3回動作し内部のガスを抜く
- ② 歯と唇でしっかりシリンジを固定する



- ③ シリンジの突起部が口唇に当たるまでシリンジを入れ、口唇をしっかりと閉じる
- 注1：空気を吸い込まないこと
注2：舌がシリンジの先に触れないこと
注3：唾液を吸い込まないこと



- ④ 30秒間、口腔ガスを溜める（鼻呼吸）
- ⑤ プランジャーをゆっくり引き、一度押し戻し、再度引いた後、口から離す



- ⑥ シリンジ全体をティッシュペーパーで拭取り、シリンジ内のガスを1mlに調整する
- 注4：シリンジ内に唾液が混入していないことを確認すること



- ⑦ OralChroma に注入後、自動測定開始（測定時間：4分間）